

Limpeza de Autoclave / Pronto Uso

- Aplicação simples;
- Solução age rapidamente;
- Não deixa resíduos;
- Prolonga a vida útil de autoclaves e utensílios em aço inox.

IMPORTANTE: Não utilizar o produto em materiais banhados em ouro, prata, níquel ou cromados.

Pré-Limpeza / Pronto Uso

- Solução com aspecto transparente; permite visualizar os materiais;
- Evita o ressecamento da matéria orgânica;
- Mantém o material úmido até o envio para a limpeza;
- Baixa formação de espuma: não prejudica a performance nos processos automatizados de limpeza;
- Facilita a remoção de sangue em instrumental com geometria complexa;
- Levemente aromatizado;
- pH neutro.

Borrifar CISA PRECLEAN por toda a superfície interna e externa dos instrumentais de forma a mantê-los sempre úmidos até o processo de limpeza final. Produto pronto uso, não deve ser diluído.

A Cisa desenvolve, fabrica e/ou comercializa equipamentos e produtos para limpeza, desinfecção e esterilização de artigos médico-hospitalares e para os segmentos industrial, farmacêutico e laboratorial, além de produtos para monitorização de processos e sistema para tratamento de resíduos hospitalares. Está no Brasil desde 2002, com uma fábrica em Joinville (Santa Catarina), município considerado o 3º maior polo industrial do Sul do Brasil. Instalada no Condomínio Perini Business Park, atende os países da América Latina, além de dar suporte para as demais unidades de negócios (escritórios e distribuidores).



Rua Dona Francisca, 8300 | Distrito Industrial
Bloco 1 - Módulo 2
CEP 89219-600 | Joinville - SC Brasil
Telefone +55 47 3801 9090
E-mail: cisa@cisabrasile.com.br

Rua Itapeva, 26, Sala 101 e 102, Bela Vista
CEP: 01332-000 - São Paulo - SP
Telefone +55 11 3287 4381

Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126
Bloco C, sala 121, Torre 2
Rio de Janeiro - RJ - Brasil



THE INFECTION CONTROL SYSTEM

www.cisabrasile.com.br

 CisaBrasileLtda

 CisaBrasile

Junho/2018- As informações contidas neste folder poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

WE CARE.
HEALTH CARE.

QUÍMICOS PARA
LIMPEZA **CISA**



THE INFECTION CONTROL SYSTEM

CISA ZYMES E CISA ZYMES ECO

Detergente Enzimático

Solução enzimática para limpeza de instrumentais cirúrgicos: hospitalares, odontológicos e endoscópios de fibra ótica flexível. Composto por cinco enzimas, os detergentes enzimáticos Cisa Zymes e Cisa Zymes ECO removem com eficácia os resíduos de proteínas, gorduras, amido, celulose e derivados. Utilizados em termodesinfectoras ou na limpeza manual de instrumentais, com eficácia comprovada nos dois procedimentos.



- Savinase – Protease: age na quebra de Hemoglobina;
- Liqunase* – Protease: age na quebra em fibrinas;
- Amilase – Carboidrase: quebra de amido e glicogênio;
- Lipase – Gordura: quebra de lipídios;
- Celulase – Carboidrase: quebra fibras de celulose e da matriz polimérica formadora do biofilme.

*específica para sangue seco

EXPERIMENTE E COMPROVE A EFICÁCIA: CISA ZYMES E CISA ZYMES ECO



- Ação exclusiva e direta na matéria orgânica sem agredir a superfície dos instrumentais e equipamentos;
- Processo de limpeza rápido e eficiente na remoção de sujidades e resíduos, diminuindo a carga microbiana presente nos materiais;
- Após sua diluição, torna-se levemente alcalino, ajudando na limpeza;
- Não produz espuma;
- Não irritante à pele e mucosas, após diluição;
- Possui laudos técnicos de atividade e de estabilidade enzimática, comprovando qualidade e eficiência ;
- Laudos de irritabilidade dérmica e ocular.

APRESENTAÇÃO



Embalado em material que garante a integridade do produto.



Informações referentes à legislação e às instruções de uso na própria embalagem.

MELHOR OPÇÃO PARA UMA LIMPEZA PESADA

CISA ZYMES – 5 LITROS CISA ZYMES – 1 LITRO CISA ZYMES – 1 LITRO COM DOSADOR		Embalagem	Rendimento			
			Manual	Automático	Lavadoras	
					Cisa 104	Cisa 155
MODO DE USAR:		5L	2500 L	2500 L	90 ciclos	70 ciclos
Diluir 2 ml de detergente em 1 litro de água para limpeza manual ou automática.		1L	500 L	500 L	18 ciclos	14 ciclos

MELHOR OPÇÃO PARA ECONOMIA X RENDIMENTO

CISA ZYMES ECO – 5 LITROS CISA ZYMES ECO – 1 LITRO COM DOSADOR		Rendimento				
		Embalagem	Manual	Automático	Lavadoras	
					Cisa 104	Cisa 155
MODO DE USAR:						
Diluir 1 ml de detergente em 1 litro de água para limpeza manual ou automática.						
	5L	5000 L	5000 L	180 ciclos	140 ciclos	
	1L	1000 L	1000 L	36 ciclos	28 ciclos	



CISA LUBRI

Lubrificante

Solução lubrificante, à base de óleo mineral, desenvolvida para lubrificar os instrumentais cirúrgicos na fase de termodesinfecção. Além de lubrificar, inibe corrosão, previne ferrugens e manchas e o enrijecimento dos instrumentais cirúrgicos. Pode ser aplicada em todos os instrumentais cirúrgicos (exceto equipamentos de vídeo). O Cisa Lubri pode ser utilizado tanto na lavagem manual quanto nas termodesinfectoras da Cisa e de outros fabricantes.

EXPERIMENTE E COMPROVE A EFICÁCIA DO CISA LUBRI

- Processo de lubrificação rápido e eficiente, sem deixar resíduos nem aspecto gorduroso;
- Contribui para manter os instrumentais em melhores condições de uso, aumentando sua vida útil;
- Não espumante.

APRESENTAÇÃO



Embalado em material que garante a integridade do produto.



Informações referentes à legislação e às instruções de uso na própria embalagem.

CISA LUBRI (Concentrado) – 5 LITROS
CISA LUBRI (Concentrado) – 1 LITRO COM DOSADOR

RENDIMENTO:

Com diluição de 2 ml para 1 litro de água, cada litro do produto rende 500 litros de solução pronta.

MODO DE USAR:

Lubrificação Manual: diluir 2 ml de Cisa Lubri para cada litro de água e mergulhar os instrumentais na solução durante 60 segundos, movimentando as articulações para melhor penetração. Realizar a secagem e esterilização.
Lubrificação Automática: Diluir 2 ml de Cisa Lubri para cada litro de água e seguir as recomendações de uso do fabricante do equipamento.
Importante: Não necessita enxágue. Quando utilizado na diluição correta, o produto não deixa resíduos nem aspecto gorduroso nos artigos.

CISA LUBRI (PRONTO USO) – 5 LITROS
CISA LUBRI (PRONTO USO) – 500 ML

MODO DE USAR:

Cisa Lubri Pronto Uso não necessita diluição. Agite levemente a solução e mergulhe os instrumentais limpos ou molhe totalmente com spray. Movimente as articulações para melhor penetração do produto. Realizar a secagem e esterilizar.



CISA NOX

Desincrustante

Solução para promover a remoção da oxidação nos instrumentais cirúrgicos com eficácia e segurança.

EXPERIMENTE E COMPROVE A EFICÁCIA DO CISA LUBRI

- Libera articulações;
- Aplicação simples;
- Não corrosivo para o aço inox;
- Não deixa resíduos;
- Previne manchas e oxidação nos instrumentais;
- Produto à base de ácido fosfórico, não prejudicando o aço inox.

APRESENTAÇÃO



Embalado em material que garante a integridade do produto.



Informações referentes à legislação e às instruções de uso na própria embalagem.

CISA NOX – 5 LITROS
CISA NOX – 1 LITRO

MODO DE USAR:

Diluir 1 (uma) parte de CISA NOX para 6 (seis) partes de água aquecida entre 40°C e 50°C. Deixar o produto agindo durante 30 minutos, utilizando escova não metálica, se necessário, para auxiliar na remoção de manchas e incrustações. Enxaguar com água em abundância.

IMPORTANTE: Não utilizar o produto em materiais banhados em ouro, prata, níquel ou cromados.



QUÍMICOS PARA LIMPEZA CISA

+ EFICÁCIA

+ QUALIDADE

+ CUIDADO