

WE CARE. HEALTH CARE.

QUÍMICOS PARA
LIMPIEZA CISA



THE INFECTION CONTROL SYSTEM

CISA ZYMES Y CISA ZYMES ECO

Detergente Enzimático

Solución enzimática para la limpieza de instrumentales quirúrgicos: hospitalarios, odontológicos y endoscopios de fibra óptica flexible. Compuesto por cinco enzimas, el detergente enzimático Cisa Zymes quita con eficacia los residuos de proteínas, grasas, almidón, celulosa y derivados.

Se lo utiliza en termodesinfectoras o en la limpieza manual de instrumentales, con eficacia comprobada en los dos procedimientos.



- Savinasa – Proteasa: actúa en la ruptura de Hemoglobina;
- Liquanasa* – Proteasa: actúa en la ruptura en fibrinas;
- Amilasa – Carbohidrasa: ruptura de almidón y glicógeno;
- Lipasa – Grasa: ruptura de lípidos;
- Celulasa – Carbohidrasa: ruptura de las fibras de celulosa y de la matriz polimérica formadora del biofilm.

*específica para sangre seca

PRUEBE Y COMPRUEBE LA EFICACIA DEL CISA ZYMES Y CISA ZYMES ECO



- Acción exclusiva y directa sobre la materia orgánica sin agredir la superficie de los instrumentales y equipos;
- Proceso de limpieza rápido y eficiente al quitar las suciedades y residuos, lo que disminuye la carga microbiana presente en los materiales;
- Tras la dilución, queda ligeramente alcalino, lo que ayuda en la limpieza;
- No produce espuma;
- No irrita la piel y mucosas, tras la dilución;
- Posee laudos técnicos de actividad y de estabilidad enzimática, lo que comprueba la calidad y eficiencia;
- Laudos de irritabilidad dérmica y ocular.

PRESENTACIÓN



Envasado en material que garantiza la integridad del producto.



Informaciones referentes a la legislación y a las instrucciones de uso en el propio envase.

MEJOR OPCIÓN PARA UNA LIMPIEZA PESADA

CISA ZYMES – 5 LITROS

CISA ZYMES – 1 LITRO

CISA ZYMES – 1 LITRO CON DOSIFICADOR

Envase	Rendimiento			
	Manual	Automático	Lavadoras	
			Cisa 104	Cisa 155
5L	2500 L	2500 L	90 ciclos	70 ciclos
1L	500 L	500 L	18 ciclos	14 ciclos

MODO DE USAR:

Diluir 2 ml del detergente en 1 litro de agua para la limpieza manual o automática.

MEJOR OPCIÓN ECONÓMICA X RENDIMIENTO

CISA ZYMES ECO – 5 LITROS

CISA ZYMES ECO – 1 LITRO CON DOSIFICADOR

Envase	Rendimiento			
	Manual	Automático	Lavadoras	
			Cisa 104	Cisa 155
5L	5000 L	5000 L	180 ciclos	140 ciclos
1L	1000 L	1000 L	36 ciclos	28 ciclos

MODO DE USAR:

Diluir 1 ml del detergente en 1 litro de agua para la limpieza manual o automática.



CISA LUBRI

Lubrificante

Solución lubricante, a base de aceite mineral, desarrollada para lubricar los instrumentales quirúrgicos durante la fase de la termodesinfección. Además de lubricar, inhibe la corrosión, previene la oxidación y manchas y el fortalecimiento de los instrumentales quirúrgicos.

Puede ser aplicada en todos los instrumentales quirúrgicos (excepto en los equipos de vídeo). El Cisa Lubri puede ser utilizado tanto en el lavado manual como en las termodesinfeccionadoras de Cisa y también de otros fabricantes.

PRUEBE Y COMPRUEBE LA EFICACIA DEL CISA LUBRI

- Proceso de lubricación rápido y eficiente, no deja residuos ni tampoco aspecto grasoso;
- Contribuye al mantener los instrumentos en mejores condiciones de uso, lo que aumenta su vida útil;
- No produce espuma.

PRESENTACIÓN



Envasado en material que garantiza la integridad del producto.



Informaciones referentes a la legislación y a las instrucciones de uso en el propio envase.

CISA LUBRI (Concentrado) – 5 LITROS
CISA LUBRI (Concentrado) – 1 LITRO CON DOSIFICADOR

RENDIMIENTO:

Con dilución de 2 ml para 1 litro de agua, a cada litro del producto rinde 500 litros de solución lista.

MODO DE USAR:

Lubricante para proceso manual: diluya 2 ml de Cisa Lubri por cada litro de agua y sumerja los instrumentos en la solución durante 60 segundos, moviendo las articulaciones para una mejor penetración. Realice luego el secado y la esterilización.

Lubricante para proceso automático: Diluya 2 ml de Cisa Lubri para cada litro de agua y siga las recomendaciones de uso del fabricante del equipo.

Importante: Para la dilución, se debe utilizar agua de osmosis reserva o agua purificada (conforme RDC 15). No requiere enjuague. Si se lo utiliza en la correcta dilución, el producto no deja residuos ni tampoco aspecto grasoso en los artículos.

CISA LUBRI (LISTO PARA USO) – 5 LITROS
CISA LUBRI (LISTO PARA USO) – 500 ML

MODO DE USAR:

Cisa Lubri Listo para Uso no requiere dilución. Agite suavemente la solución y sumerja los instrumentos limpios y húmedos totalmente con el spray. Mueva las articulaciones para una mejor penetración del producto. Realice luego el secado y la esterilización.



Desincrustante

Solución para realizar la remoción de la oxidación de los instrumentos quirúrgicos con eficiencia y seguridad.

EXPERIMENTE Y COMPRUEBE LA EFICACIA DEL CISA NOX

- Libera articulaciones;
- Aplicación simple;
- No corrosivo para el acero inoxidable;
- No deja residuos;
- Previene manchas y oxidación de los instrumentos;
- Producto a base de ácido fosfórico, no perjudica el acero inox.

PRESENTACIÓN



Envasado en material que garantiza la integridad del producto.



Informes referentes a la legislación de las instrucciones de uso en el propio envase.

CISA NOX – 5 LITROS
CISA NOX – 1 LITRO

MODO DE USAR:

Diluir 1 (una) parte de CISA NOX para 6 (seis) partes de agua caliente entre 40°C y 50°C. Dejar el producto que actúe durante 30 minutos, utilizando una escoba metálica, si es necesario, para ayudar en la remoción de manchas e incrustaciones. Enjuague con agua abundante.

IMPORTANTE: No utilizar el producto en materiales blandos en oro, plata, níquel o cromados.



QUÍMICOS PARA LIMPIEZA CISA

+ EFICIENCIA

+ CALIDAD

+ CUIDADO

CISA STEEL

Limpieza de Esterilizadores / Listo para Uso

Solución para remover herrumbre y manchas de las superficies del esterilizador y en los demás utensilios en acero inoxidable.

EXPERIMENTE Y COMPRUEBA LA EFICIENCIA DEL CISA STEEL

- Acciones simples;
- Solución de acción rápida;
- No deja residuos;
- Prolonga la vida útil de los esterilizadores y utensilios en acero inoxidable.

PRESENTACIÓN



Envasado en material que garantiza la integridad del producto.



Informes referentes a la legislación de las instrucciones de uso en el propio envase.



CISA STEEL - 500 ML

MODO DE USAR:

Rociar CISA STEEL en toda la superficie de la cámara, dejándola actuar de 5 a 15 minutos en temperatura ambiente. Para optimización del proceso de limpieza, puede ser utilizada una escoba metálica. Enjuagar con agua abundante. Producto Listo para Uso.

IMPORTANTE: No utilizar el producto en materiales blandos en oro, plata, níquel o cromados.

CISA PRECLEAN

Prelimpieza / Listo para Uso

Solución para la prelimpieza de instrumentales quirúrgicos: médicos, hospitalarios y odontológicos. CISA PRECLEAN mantiene el material húmedo, lo que impide la adherencia y facilita la remoción posterior de la materia orgánica.

EXPERIMENTE Y COMPRUEBE LA EFICACIA DEL CISA PRECLEAN

- Solución con aspecto transparente: permite la visualización de los materiales;
- Evita la sequedad de la materia orgánica;
- Mantiene el material húmedo hasta el envío para la limpieza;
- Baja formación de espuma: no perjudica la actuación durante los procesos automatizados de limpieza;
- Facilita la remoción de la sangre en instrumental con geometría compleja;
- Ligeramente aromatizado;
- pH neutro.

PRESENTACIÓN



• Embalado en material que garante a integridade do produto;
• Empaque con bloqueo, lo que garantiza una mejor seguridad de uso del producto.



Informaciones referentes a la legislación y a las instrucciones de uso en el propio envase.



CISA PRECLEAN - 500 ML

MODO DE USAR:

Rocíe CISA PRECLEAN por toda la superficie interna y externa de los instrumentales para que se mantengan siempre húmedos hasta el proceso de limpieza final. Producto listo para el uso, no se debe diluirlo.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Cisa desarrolla, fabrica y comercializa equipamientos y productos para limpieza, desinfección y esterilización de artículos médicos-hospitalarios y para el área industrial, farmacéutico y de laboratorio, además de productos para monitoreo de procesos y sistema para tratamiento de residuos hospitalarios. Está en Brasil desde 2002, con una fábrica en Joinville (Santa Catarina), municipio considerado el 3º mayor parque industrial del Sur de Brasil. Instalada en el Condominio Perini Business Park, atiende a los países de América Latina, además de dar soporte a las demás unidades de negocios (oficinas y distribuidores).



Cisa Brasile Ltda.

Fábrica y oficina

Rua Dona Francisca, 8300 | Distrito Industrial
Bloco I - Módulo 2
CEP 89219-600 | Joinville - SC Brasil
Teléfono +55 47 3801 9090
E-mail: cisa@cisabrasile.com.br



Filial en San Pablo

Rua Itapeva, 26, Sala 101 e 102, Bela Vista
CEP: 01332-000 - São Paulo – SP
Teléfono +55 11 3287 4381

Filial en Rio de Janeiro

Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126
Bloco C, sala 121, Torre 2
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

