

CISA ZYMES E CISA ZYMES ECO

Detergente Enzimático

Solução enzimática para limpeza de instrumentais cirúrgicos: hospitalares, odontológicos e endoscópios de fibra ótica flexível. Composto por cinco enzimas, os detergentes enzimáticos Cisa Zymes e Cisa Zymes ECO removem com eficácia os resíduos de proteínas, gorduras, amido, celulose e derivados. Utilizados em termodesinfectoras ou na limpeza manual de instrumentais, com eficácia comprovada nos dois procedimentos.

5
enzimas

- Savinase – Protease: age na quebra de Hemoglobina;
- Liqunase* – Protease: age na quebra em fibrinas;
- Amilase – Carbohidrase: quebra de amido e glicogênio;
- Lipase – Gordura: quebra de lipídios;
- Celulase – Carbohidrase: quebra fibras de celulose e da matriz polimérica formadora do biofilme.

*específica para sangue seco

EXPERIMENTE E COMPROVE A EFICÁCIA: CISA ZYMES E CISA ZYMES ECO



Produto de fontes naturais e renováveis

- Ação exclusiva e direta na matéria orgânica sem agredir a superfície dos instrumentais e equipamentos;
- Processo de limpeza rápido e eficiente na remoção de sujidades e resíduos, diminuindo a carga microbiana presente nos materiais;
- Após sua diluição, torna-se levemente alcalino, ajudando na limpeza;
- Não produz espuma;
- Não irritante à pele e mucosas, após diluição;
- Possui laudos técnicos de atividade e de estabilidade enzimática, comprovando qualidade e eficiência;
- Laudos de irritabilidade dérmica e ocular.

APRESENTAÇÃO



Embalado em material que garante a integridade do produto.



Informações referentes à legislação e às instruções de uso na própria embalagem.

MELHOR OPÇÃO PARA UMA LIMPEZA PESADA

Embalagem	Rendimento			
	Manual	Automático	Lavadoras	
			Cisa 104	Cisa 155
CISA ZYMES – 5 LITROS	2500 L	2500 L	90 ciclos	70 ciclos
CISA ZYMES – 1 LITRO	500 L	500 L	18 ciclos	14 ciclos

MODO DE USAR:

Diluir 2 ml de detergente em 1 litro de água para limpeza manual ou automática.

MELHOR OPÇÃO PARA ECONOMIA X RENDIMENTO

Embalagem	Rendimento			
	Manual	Automático	Lavadoras	
			Cisa 104	Cisa 155
CISA ZYMES ECO – 5 LITROS	5000 L	5000 L	180 ciclos	140 ciclos
CISA ZYMES ECO – 1 LITRO COM DOSADOR	1000 L	1000 L	36 ciclos	28 ciclos

MODO DE USAR:

Diluir 1 ml de detergente em 1 litro de água para limpeza manual ou automática.



CISA LUBRI

Lubrificante

Solução lubrificante, à base de óleo mineral, desenvolvida para lubrificar os instrumentais cirúrgicos na fase de termodesinfecção. Além de lubrificar, inibe corrosão, previne ferrugens e manchas e o enrijecimento dos instrumentais cirúrgicos. Pode ser aplicada em todos os instrumentais cirúrgicos (exceto equipamentos de vídeo). O Cisa Lubri pode ser utilizado tanto na lavagem manual quanto nas termodesinfectoras da Cisa e de outros fabricantes.

EXPERIMENTE E COMPROVE A EFICÁCIA DO CISA LUBRI

- Processo de lubrificação rápido e eficiente, sem deixar resíduos nem aspecto gorduroso;
- Contribui para manter os instrumentais em melhores condições de uso, aumentando sua vida útil;
- Não espumante.

APRESENTAÇÃO



Embalado em material que garante a integridade do produto.



Informações referentes à legislação e às instruções de uso na própria embalagem.

CISA LUBRI (Concentrado) – 5 LITROS
CISA LUBRI (Concentrado) – 1 LITRO COM DOSADOR

RENDIMENTO:

Com diluição de 2 ml para 1 litro de água, cada litro do produto rende 500 litros de solução pronta.

MODO DE USAR:

Lubrificação Manual: diluir 2 ml de Cisa Lubri para cada litro de água e mergulhar os instrumentais na solução durante 60 segundos, movimentando as articulações para melhor penetração. Realizar a secagem e esterilização.
Lubrificação Automática: Diluir 2 ml de Cisa Lubri para cada litro de água e seguir as recomendações de uso do fabricante do equipamento.
Importante: Não necessita enxágue. Quando utilizado na diluição correta, o produto não deixa resíduos nem aspecto gorduroso nos artigos.

CISA LUBRI (PRONTO USO) – 5 LITROS
CISA LUBRI (PRONTO USO) – 500 ML

MODO DE USAR:

Cisa Lubri Pronto Uso não necessita diluição. Agite levemente a solução e mergulhe os instrumentais limpos ou molhe totalmente com spray. Movimente as articulações para melhor penetração do produto. Realizar a secagem e esterilizar.



CISA NOX

Desincrustante

Solução para promover a remoção da oxidação nos instrumentais cirúrgicos com eficácia e segurança.

EXPERIMENTE E COMPROVE A EFICÁCIA DO CISA NOX

- Libera articulações;
- Aplicação simples;
- Não corrosivo para o aço inox;
- Não deixa resíduos;
- Previne manchas e oxidação nos instrumentais;
- Produto à base de ácido fosfórico, não prejudicando o aço inox.

APRESENTAÇÃO



Embalado em material que garante a integridade do produto.



Informações referentes à legislação e às instruções de uso na própria embalagem.

CISA NOX – 5 LITROS
CISA NOX – 1 LITRO

MODO DE USAR:

Diluir 1 (uma) parte de CISA NOX para 6 (seis) partes de água aquecida entre 40°C e 50°C. Deixar o produto agindo durante 30 minutos, utilizando escova não metálica, se necessário, para auxiliar na remoção de manchas e incrustações. Enxaguar com água em abundância.

IMPORTANTE: Não utilizar o produto em materiais banhados em ouro, prata, níquel ou cromados.



QUÍMICOS PARA LIMPEZA CISA

+ EFICÁCIA

+ QUALIDADE

+ CUIDADO